

Piss call

こんなときは？



Q アラーム治療はどれくらいの期間続けるのでしょうか？
A 3ヶ月継続することが大切です。過去の症例では1ヶ月で大幅に改善したケースもありますが、一旦、改善しても再発しない様、3ヶ月間は継続しましょう。

Q 専用トレーニングパッドの種類をおしえて下さい
A M-200タイプ：約3～5cc 前後から感知 吸収量の目安 ～200cc
 L-200タイプ：約3～5cc 前後から感知 吸収量の目安 ～300cc

夜尿症トレーニングシステム ピスコール 仕様

商品名	 送信機	 受信機	 振動型受信機 ピスコールウォッチ オプション	 トレーニングパッド (L-200 M-200)
メーカー希望小売価格	8,800円(税込)	9,240円(税込)	11,000円(税込)	1,914円 / 30枚入(税込)
電池タイプ	DC3.0V (CR2032)	DC4.5V (単4乾電池3本 / 単4Ni-H充電電池3本)	LiFePo4電池(充電式)	
電池寿命	1日1回の使用で約2～3ヶ月 (電池寿命は目安であり、 使用条件により変わります)	1日1回8時間使用で 約7～10日*	約24ヶ月(寿命)	
外形寸法	W42×D12×H50mm	W68×D22×H115mm (ランプ・スイッチ含まず)	W62×D42×H19mm	M-200(210×420mm) L-200(210×490mm)
質量	12g (電池含まず)	99g (電池含まず)	46g (電池含まず)	20, 26g / 枚 (吸水量 200, 300cc)
材質	ABS樹脂・ステンレス / 準防水仕様	ABS樹脂・ステンレス	ABS樹脂	ポリオレフィン系不織布 他
使用環境 周囲温度	+5℃～+45℃	+5℃～+45℃	+5℃～+45℃	常温

特許登録4727745、商標登録5590413、5590414

*電池寿命は目安であり、使用条件により変わりますので、2～3日に一度は充電して下さい。

お気軽にお問い合わせください。

ピスコールについてのご質問や使用方法や取扱方法、アラームによるトレーニングへの疑問点などは、右記のピスコール専用回線までお気軽にお問い合わせください。

製造・販売元 **株式会社 アワジテック**

〒652-0811 兵庫県神戸市兵庫区新開地 3-1-14
 TEL 078-224-5233 FAX 078-367-8850
<https://www.pisscall.jp> info@pisscall.jp

 **078-224-5233**

受付時間：月～金10:00～17:00(土日祝休み)
 ※12時～13時は留守番電話となります。ご了承ください。
 メール：info@pisscall.jp

ご注文・申し込みは右のQRコード先のオンラインストアにてご利用頂けます。



※製品の仕様・価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
 ※「ピスコール」は岡山大学病院泌尿器科との共同開発製品です。

UD FONT

夜尿症でお悩みのご家族の方へ

Piss call
ピスコール
 夜尿症トレーニングシステム



あさ、笑顔で


ピスコールは、夜尿症治療に適した新しいおねしょアラームです。

 **株式会社 アワジテック**



ピスコール Piss call

日本で最も多くの病院・医師に採用されているアラーム機器

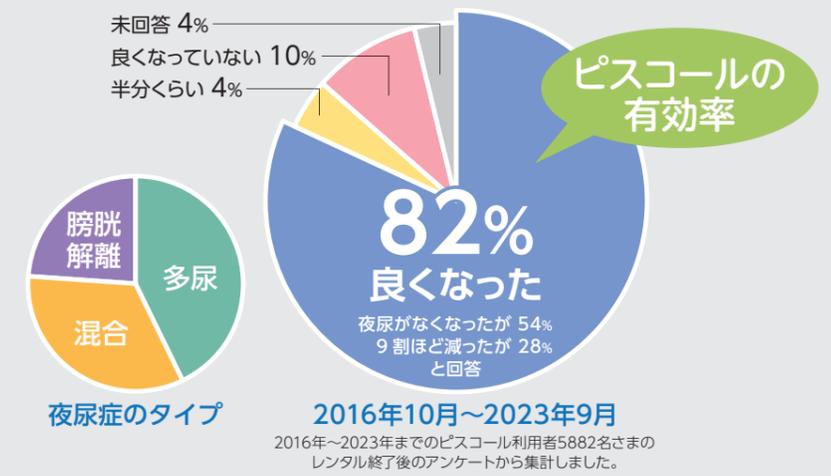

■ 夜尿症アラームトレーニングとは

夜尿をするとセンサーが感知し、アラーム音でお知らせします。無意識的に尿をためる力、夜尿を抑制する力がつき、最終的には朝まで夜尿せずに眠れるようになります。決して起こすことが目的ではなく、アラームを鳴らさずに寝ようという意識を動かせることによって夜尿をしなくなるトレーニングです。

アラームトレーニングは夜尿症学会の「夜尿症診療ガイドライン」において、薬物療法と並んで第一選択の治療のひとつに推奨されており、一旦治ると薬物療法に比べて圧倒的に再発率が低いという特徴があります。



■ ピスコールが選ばれる理由

ピスコールは音量調節が可能な豊富なメロディ、強力なバイブレーション機能を搭載、眠りの深いお子様でも起きられる工夫がなされています。ワイヤレスのためコードによる不快感もありません。ピスコールは途中でドロップアウトしにくく、安全安心にこだわったアラーム機器です。

また、オプションとして開発されたウェアラブル(身に着けられる)振動型受信機「ピスコールウォッチ」を使用することで、大きな音を出さずに本人にのみ強い振動で覚醒を促します。不必要に周囲のご家族も起こしてしまうといったようなデメリットを解消したトレーニングが可能になります。

シンプルな使用方法

ピスコールの使用方法はとてもシンプル。受信機の電源をONにし、送信機を専用パッドに取り付けるだけ。わずかな尿量でも感知し、覚醒を促します。電池消耗もLEDランプでお知らせします。

■ 総合レンタルプラン

医療機関との連携による安心のサービス

ピスコールをご使用頂いている夜尿症治療の医療機関の協力もあり、ピスコール送・受信機セットの総合レンタルプランがご利用頂けます。「ピスコール利用可能病院」に掲載されている病院にご相談ください。



レンタル利用可能病院 確認はこちらから!

登録病院数 1300病院突破! ※2024年2月時点

- 費用が抑えられる
- スタッフによる安心・安全なご対応
- 登録・解約が簡単

医療関係者の皆さま

★ 医療機関さまの「ピスコール利用可能病院」への新規登録もホームページから可能です ★

■ 確実な覚醒機能

ピスコールの仕組み

トレーニングパッド

排尿を感知



音振動

受信機



スマートフォン専用アプリ

送信機

専用のトレーニングパッドに装着した送信機が排尿を感知し、受信機やウェアラブル受信機へ即座に信号を飛ばします。



強振動

※音は出ません

ウェアラブル受信機

オプション


受信機は大きな音と振動を、ウェアラブル受信機は強い振動を与え、排尿したタイミングで覚醒刺激を患児に与えます。また、スマートフォンと連動することで、別室で就寝中のご家族にもお知らせをすることができ、夜尿記録もつけられます。

■ お客様から頂いたたくさんのうれしい声

実際にピスコールをご利用いただいたお客様から日々アンケートを頂戴しております。頂いたご意見・ご感想をもとに品質改良に取り組んでいます。

ピスコール利用者様の声

<https://www.pisscall.jp/episodesnew/topics.cgi>

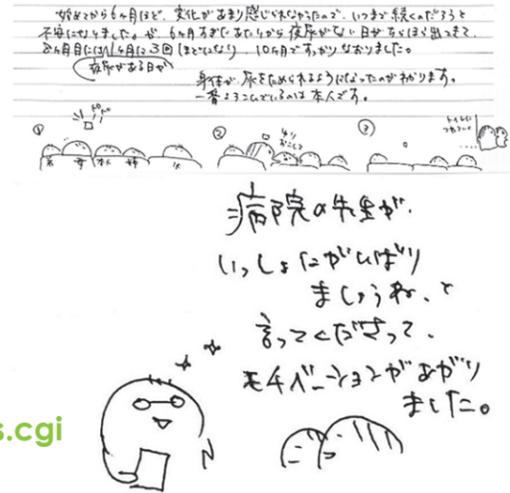

病院の先生が、いしよにかいぱりまじりや、さうさくはさって、そんがーよかまがりまじり。